



ROMET® Quality Medical Products Serving  
the Laryngectomy Community Since 1979



## **9 VOLT R200 KONUŞMA CİHAZI**

## ROMET 200&210 ÖZELLİKLERİ

- 2 Yıl Garanti
- 90dB Yüksek ses çıkış seviyesi
- Dönerli ton kontrolü ve ince ton ayarı yapılabilen çevirmeli başlık
- Kontrol edilebilir ses ayarı ve konuşma butonu
- Şarj edilebilir 9V ion pil 9 ila 12 saat şarj süresi. Hızlı şarj edilebilir.
- Kırılmaya dayanıklı alüminyum gövde
  - Hafif ve küçük
  - Batarya yuvasının açılmasını önleyen klit sistemi
- Ağız yoluyla konuşmayı sağlayan oral adaptör.

## COMPLETE KIT

- 1 – R200
- 1 – Küçük Şarj Cihazı
- 2 – Şarj Edilebilir 9V Lithium-Ion Pil
- 1 – Oral Adaptör Başlığı
- 1 – Stoma İçin Lamba
- 1 – Güvenlik İçin Boyun Askısı



# ŞARJ ALETİ & BATARYA TALİMATLARI

**Şarj Aleti:** Üniteyle birlikte 2 – 9V Lityum-İyon batarya temin edilecektir. Ünitenizi aldığınızda bataryaların doluluk oranı %80 olacaktır. Maksimum gücü elde etmek amacıyla kullanım öncesinde lütfen bataryalarınızı tamamen doldurunuz. Lityum şarj cihazınızı 110 V devreye takınız (220V, yerel alan için bir adaptöre ihtiyaç duyacaktır – setinize dahil değildir).

Şarj aletine bir veya iki tekrar şarj edilebilir batarya yerleştiriniz. Kırmızı LED ışık = Şarja ihtiyacı var. Yeşil LED ışık = Tamamen şarj oldu.



## Bataryanın yerleştirilmesi:

Bataryanın sonunda yer alan kapağı üniteden ayırın ve 9V lityum bataryayı kovana yerleştirin. Bataryanın kutupsallığı, değiştirilebilir niteliktedir; + veya – batarya kutuplarının yerleri de değiştirilebilir. Elektrik teması, kovanın uç kapağının kovanın bitimine vidalanmasıyla birlikte otomatik olarak sağlanacaktır.

Batarya üniteye ilk defa yerleştirildiğinde hafif bir basıncın yapılması gerekmektedir. ZORLAMAYINIZ

**UYARI:** Li-İyon bataryaları sadece Li-İyon şarj aletleriyle şarj ediniz. Diğer şarj aletleriyle şarj etme GİRİŞİMİNDE BULUNMAYINIZ. NiMH gibi şarj aletinde diğer bataryaları YERLEŞTİRMEYİNİZ. **Normal 9V alkali bataryalar, Romet elektro-larenkste işlev gösterecektir.**

## KONUŞMA TALİMATLARI

Tek elle konuşmanızı kontrol etmek kolaydır.

**HERHANGİ BİR ARAÇ GEREKLİ DEĞİLDİR.**

### Ayarlanabilir üst başlık:

Gerekli olması halinde ince ses ayarı için döndürün.

UYARI – başlığın fazla ayarlanması, azalan ses kalitesiyle sonuçlanmaktadır; dikkatli olun.

### Açma/Kapama Tuşu:

Konuşmak için düğmeye basın ve bittiğinde serbest bırakın.

**Ton kontrolü:** (solda) Kolay ayarlama için tekerleği daha yüksek veya düşük yive ayarlayın. İstenilen yiv seviyesine ulaştıktan sonra ilave ayara gerek yoktur.

İnce Ayar

Aç-Kapa Düğmesi

Ton Ayarı

Ses Düzeyi Ayarı



**Ses kontrolü:** (sağda) Vurgu amaçlı konuşma ses düzeyini arttırmak veya azaltmak için tekerleği döndürün.

**Uygulama:** Romet Elektronik Larenksi boynunuza yerleştirin ve en iyi vokal tonu elde etmek amacıyla "en etkili noktayı" bulmaya çalışın.

NOT: Bu nokta boynunuzda veya ağzınızın bir bölgesindeki çoklu yerler olabilmektedir; her bir kişi, cilt dokusuna ve alınan radyasyon miktarına göre farklılık göstermektedir. Aynaya bakın ve ses netliği elde etmek için basit cümleleri tekrarlayın. Mümkün olması halinde sesinizi kaydedin ve nasıl işitildiğinizi duymak için tekrar oynatın. Düzenli olarak uygulayın!

# ORAL ADAPTÖR TALİMATLARI



Basıncın boğaza uygulanması için boyun yeteril kadar iyileştirilmesinden önce ve intra-oral kullanımın tercih edildiği yerlerde oral adaptör, boyun tipi yapay larenksi (AL) intra-oral aygıt olarak kullanmanıza olanak tanımaktadır. (Ağrı veya öksürük reaksiyonu, yorgunluk, boğaz dokularının şişmesi, vs.).

- Adaptörün tepesindeki küçük deliğe tüpü yerleştirin.
- İyi tutunmasını sağlamak için tüpü itin. BASTIRMAYIN, bu sayede adaptörün ana boşluğuna doğru genişleyecektir.
- Adaptör başlığını düzgün bir şekilde oturmasını sağlamak amacıyla AL üzerinden itin.
- Baskın elinizi yazma ve diğer işler için kullanmak üzere AL'yi baskın olmayan elinizle tutunuz.
- Tüpün 1 1/2" ila 2" (3.8 cm ila 5cm) kısmını ağız köşesine yerleştirin ve açık ucun dilin üzerinde ve ağzın tavanına bakmasına dikkat edin.
- Kelimeleri doğal olarak şekillendirebilmek için dili mümkün olduğu kadar serbest bırakın.
- Açma / kapama tuşuna basın ve konuşmak için ağızınızda ses olacaktır.



## KONUŞMA PRATİĞİ

- Düğmeye basın ve basit harfleri söylemeye çalışın: "A aa, E eee, I, O oo, U"
- Daha sonra kısa, basit sesler çıkarın: "Ma Ma" ve "Da Da"
- Daha sonra saymaya başlayın: "bir, iki, üç, dört, beş" vs. Acele etmeyin. Her kelimeyi dikkatlice telaffuz edin.
- Bir kaç basit ifadeyi deneyin: "Nasılsın? Mary'nin küçük bir kuzusu var". Yavaşça konuşun ve telaffuza önem verin. Daha net konuşmayı öğrendikçe daha hızlı konuşmaya başlayacaksınız, ancak çok hızlı konuşmayın veya sesleri ve kelimeleri arka arkaya tekrarlamayın.
- Sesi kapatmak için ve kelimeler, ifadeler ve cümleler arasında düğmeyi kullanarak konuşmanızı daha anlaşılabilir hale getirin. Sesin tamamen söylediğiniz gibi olması halinde bazı seslerin daha kolay anlaşıldığını göreceksiniz.
- Ses kaydedici kullanın! En iyi olası konuşmanızı geliştirirken konuşma terapistinin yardımı faydalı olabilecektir ve dil koordinasyon problemi veya dil kas hasarı olan kişiler de özellikle fayda sağlayacaktır. "g" ve "k" gibi bazı seslerin intra-oral aygıtlarla dile getirilmesi oldukça güçtür. "Fishing" yerine "fishin" diyebilirsiniz. Diğer seslerinizin net olması durumunda hafif özensiz sesin

anlaşılması çok güç olmayacaktır. Veya söylemesi daha kolay olan ve benzer anlama sahip bir kelimeleri kullanın. "Cut the grass" (çimi kes) yerine "Mow the lawn"(çimi biç) söyleyebilirsiniz.

## TELEFONDA EKSTRA YAVAŞ VE DİKKATLİ KONUŞUN

İnsanlar dudak hareketinizi ve yüz ifadelerinizi göremez. Cümlelerin devamında herhangi bir ipucu olmaması sebebiyle dinleyici açısından anlaşılması en güç olan adınız ve adresinizdir. Bunları oldukça yavaş ve dikkatlice ifade edin. Adınızı ve adresinizi tanımadığınız birisine söylerken ilk önce 3 veya 4 cümle söyleyin ve bu sayede dinleyicinin konuşma şeklinizi anlamasını sağlayın. En iyi düzeyi ve ses ayarını ve daha fazla dikkat edilmesi ve uygulama yapılması gereken sesleri belirleyebilmek için bir arkadaş veya akrabanızla telefonda uygulama yapın. Ayrıca, kendinizi dinleyebilmek için yanıtlayıcı makinesiyle çalışmayı deneyin.

**TÜPLER** – Kapaklı tüpler, herhangi bir pozisyonu elde edecek şekilde eğilebilir ve salya girişinin önlenmesine veya sesin dil veya yanak tarafından engellenmesinin önüne geçilmesine yardımcı olmaktadır – ancak, salya veya gıdalarla tıkanması mümkündür. Tüpleri keserek diğer tüp uzunluklarını deneyebilirsiniz. Kapaklı tüpler için tel kesiciler gereklidir.

## ORAL ADAPTÖR TÜPLERİN BAKIMI

- Tüp içinde biriken nemi tüpü çalkalayarak atın
- Konuşmadan önce yemek yedikten veya içecek içtikten sonra ağızınızı yıkayın.
- Tüpleri sıcak su ve sabun veya deterjanla yıkayın.
- Kapaklı tüp kullanıyorsanız yuvaları fırçalayın.
- Pası önlemek için durulayın ve kurumasını bekleyin.
- Tüpler kaynatılabilir veya ağartılabilir. Plastik, beyazlayabilir ve kapaklı tüpün teli paslanabilir, bu durum tüp kullanımını etkilemeyecektir.

**ÖNEMLİ:** Salya veya içecek, uzun süre boyunca AL başlığında uzun süre bekletilmemelidir. Düzenli olarak adaptörü AL'den çıkarın ve nem veya yabancı malzemeleri başlıktan gidermek ve adaptör içinden temizlemek için yumuşak bir doku kullanın. Bu işlem, ünitenin gece için hazırlanmasından önce en az her gece ve başlığın temiz ve kuru tutulmasını sağlayacak şekilde daha sık gelişen ihtiyaçlara göre gerçekleştirilmelidir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN



Mithatpaşa Cd. No: 47/B Kat 4 06420 KIZILAY  
Tel: (312) 430 28 00 Faks: (312) 434 07 00  
www.duyses.com.tr



Fountain Head  
MARKETING, INC.